

InhalC

Art-Nr.: 927xx>



SCHLAF-LADEN
Innovative Lösungen gegen
Schnarchen & Zähneknirschen
www.schnarchen-infos.de

19,95EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-[Versand](#)

🕒 Innerhalb von 24 Stunden versandfertig



Image not found



SCHLAF-LADEN
Innovative Lösungen gegen
Schnarchen & Zähneknirschen
www.schnarchen-infos.de

Produktinformation

InhalClip

Ein Nasenclip - zwei Funktionen

Unseren seit langem bewährten und beliebten Clipair gibt es nun mit einer erweiterten Funktion.

- Der Nasenclip erweitert die Nasenflügel und erleichtert so die Atmung
- Das beiliegende ätherische Öl sorgt je nach Formel für einen entspannten, ruhigen Schlaf, oder für eine freie Nase bei Erkältungen und Heuschnupfen.

Wie wirkt der doppelt-aktive InhalClip?

InhalClip besteht aus einem kleinen diskreten Nasenclip aus biomedizinischem, elastischem und porösem Material, das angenehm zu Tragen ist, sowie aus einem sehr praktischen Roll-on Applikator, der die 100% reinen ätherischen Öle enthält. Der Roll-on wird auf dem Dilatator oder auch lokal auf der Haut angewendet und erlaubt so eine langanhaltende Inhalation durch die Nase.

Dank seiner ausgeklügelten Form erweitert der Nasenclip die Nasenflügel für die eingeatmete Luft und erleichtert die Atmung.



SCHLAF-LADEN
Innovative Lösungen gegen
Schnarchen & Zähneknirschen
www.schnarchen-infos.de

Produktinformation

Ratschläge zur Anwendung InhalClip

Anwendung mit Nasenclip:

Das mikroporöse Material im Bereich des unteren Bogens nimmt das Öl auf wie ein Schwamm. Bestreichen Sie den Bogen mit dem Roll-On und lassen Sie das Öl 1-2 Minuten einziehen. Je nach gewünschter Intensität können Sie den Vorgang bis zu dreimal wiederholen


Anwendung ohne Nasenclip:

Tragen Sie einige Öltropfen unter die Nase, hinter den Ohren, auf den Schläfen oder auf die Stirn und massieren Sie diese leicht ein.

Für Schwangere und Kinder unter 12 Jahre nicht geeignet.



InhalClip gibt es in zwei Varianten: 1. Relax-Formel

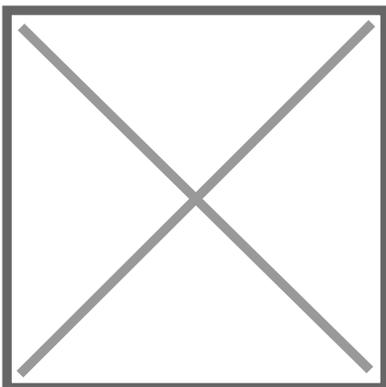

Die **RELAX FORMEL** enthält eine Mischung ätherischer Öle zur Beruhigung, zusammengestellt von unserem Apotheker, Spezialist für Aromatherapie.

Sein Duft ist ar

Wann benutzt



SCHLAF-LADEN
Innovative Lösungen gegen
Schnarchen & Zähneknirschen
www.schnarchen-infos.de

- Stress od
- Schwierigkeiten beim Einschlafen
- Unruhigen Schlaf, Schlafstörungen
- Nächtliche Angstzustände
- Schlaflosigkeit

Produktinformation

Nicht anzuwenden bei :


Da der Nasenclip aus biocompatiblem Material ist, und die ätherischen Öle 100% natürlich sind, gibt es wenige Kontraindikationen. Dennoch ist Vorsicht geboten bei:

- Überempfindlichkeit der Nasenschleimhäute
- Allergie gegen bestimmte ätherische Öle.
- Nicht anwenden bei inneren Verletzungen der Nase.
- Für schwangere und Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei einigen Personen kann InhalClip **RELAX FORMEL** eine Verminderung der Wachsamkeit hervorrufen. In diesem Fall, vermeiden Sie es InhalClip beim Arbeiten oder beim Autofahren zu benutzen.

2. Erkältungs Formel

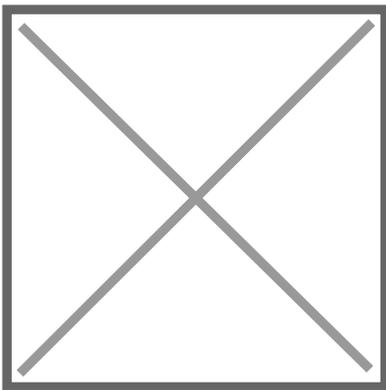

Die **ERKÄLTUNGS FORMEL** enthält ätherische Öle, die abschwellend und desinfizierend wirken, zusammengestellt durch unseren Apotheker, Spezialist für Aromatherapie.

Sein angenehmer und frischer Duft gibt das gute Gefühl, frei zu atmen.

Wann benutzt man InhalClip **ERKÄLTUNGS FORMEL**?

- bei verstopfter Nase
- bei Erkältung
- bei Heuschnupfen
- bei erschwelter Atmung

Nicht anzuwenden bei:

Da der Nasenclip aus biocompatiblem Material ist, und die ätherischen Öle 100% natürlich sind, gibt es wenige Kontraindikationen. Dennoch ist Vorsicht geboten bei:

- Überempfindlichkeit der Nasenschleimhäute
- Allergien
- Nicht anwenden
- Für schwache Schnarcher



SCHLAF-LADEN
Innovative Lösungen gegen
Schnarchen & Zähneknirschen
www.schnarchen-infos.de

Das Set Inhalt

Produktinformation

- Ein Nasenclip in 3 Größen S, M und L
- Ein Roll-on Flakon (5 ml) mit vier 100% reinen ätherischen Ölen
- Eine Aufbewahrungsbox für den Nasenclip
- Eine Gebrauchsanweisung