

Somno



Art-Nr.: 10000:



**SCHLAF-LADEN**  
Innovative Lösungen gegen  
Schnarchen & Zähneknirschen  
[www.schnarchen-infos.de](http://www.schnarchen-infos.de)

**Ile 1**



### Sonderangebot

**25,95EUR**

Unser alter Preis 33,95EUR (Sie sparen 8,00EUR)

inkl. 19% USt. inkl. [Versand](#)

📦 Innerhalb von 24 Stunden versandfertig  
Dieses Produkt ist versandkostenfrei!



Somnolis die einfache komfortable Schnarchschiene

Jetzt versandkostenfrei bei uns bestellen!

Geben Sie sich und Ihrem Partner wieder die nächtliche Erholung, die Sie brauchen!

## Somnolis®

ist die wirksamste  
geringste Größe!  
Urlaub, Camping  
Preis bietet Ihr



**SCHLAF-LADEN**  
Innovative Lösungen gegen  
Schnarchen & Zähneknirschen  
[www.schnarchen-infos.de](http://www.schnarchen-infos.de)

ört und die  
endung (z.B.  
akzeptabler

Schnarchschiene, die durch den Zahnarzt angepaßt werden, sind häufig sehr teuer, aufwendig und müssen privat bezahlt werden!

## Produktinformation

Stille Nächte ... Somnolis® **gegen Schnarchen**

Somnolis® ist eine Mundschiene, die zu einem Vorschub des Unterkiefers um einige Millimeter führt. Die dadurch erreichte Erweiterung des Luftweges bei der Einatmung verhindert das Schnarchen und führt zu einem angenehmen Schlaf **ohne Schnarchen!**

Somnolis® kann verwendet werden zur:

Beseitigung des **habituellen** (regelmäßigen), nicht krankmachenden **Schnarchen**.

- Schnarchen nach Alkoholgenuss.
- Schnarchen bei Allergien oder auf Reisen.
- Schnarchen bei Erkältungen.
- Zusammen mit herausnehmbaren Zahnersatz.
- Zur Austestung, ob sie eine individuelle Unterkieferprotrusionsschiene in der Nacht tragen können.

[Vorteile der Somnolis Schnarchschiene:](#)

- Komfortable Passung durch einzigartige Konstruktion.
- Leichte, praktische Handhabung.
- Diskret und bequem zu benutzen (die Schiene wiegt nur 8 Gramm)
- Die Kieferposition ist auf 4 Positionen regulierbar.
- Klinisch geprüfte Wirkungsweise.
- Biokompatibles, angenehmes Material.
- Exzellente Hygiene (leicht zu reinigen)
- ideale Schiene zum Testen

[Was muss ich bei der Anwendung der Somnolis Mundschiene beachten?](#)

Bei allen Formen der obstruktiven Schlafapnoe sollte Somnolis® nicht angewandt werden.

Konsultieren sie einen Arzt wenn sie Somnolis® bei leichter Schlafapnoe sporadisch auf Reisen anwenden.

Die Voraussetzung für die Verwendung von Somnolis® sind wie bei allen Mundschienen gesunde Zähne im Ober- und Unterkiefer.

Somnolis ist eine ideale Knirscherschiene für den Einstieg und zum testen. Somnolis sollte nicht über einen längeren Zeitraum jede Nacht getragen werden.

Für dauerhaftes tragen entscheiden Sie sich bitte für.

Schnarchschiene Somnofit

High End Schnarchschiene Somnofit-S

[Wie wirkt die Mundschiene Somnolis?](#)

Während des S  
Lösung wird di



**SCHLAF-LADEN**  
Innovative Lösungen gegen  
Schnarchen & Zähneknirschen  
[www.schnarchen-infos.de](http://www.schnarchen-infos.de)

edizinische

1 kann. Sie

Diese Protrusion

verhindert oder reduziert in erheblicher Weise das Schnarchen.

## Produktinformation

---

[Wie erfolgt die Anwendung von Somnolis®?](#)

**Somnolis®** besteht aus einer Mundschiene (für Unterkiefer und Oberkiefer). Ober- und Unterteil sind mit einem elastischen Band verbunden, um den Unterkiefer flexibel und komfortabel nach vorn zu positionieren.

Für eine erholsame Nacht muss **Somnolis®** nur noch jeden Abend in den Mund eingesetzt werden.

Das Set besteht aus:

- Somnolis Protrusionsschiene
- 4 unterschiedlich lange Bändchen
- Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungsbox in blau



Lesen Sie auch unsere Tipps zum Tragen einer Schnarchschiene

[Wie bestelle ich die Schnarchschiene Somnolis in der Apotheke?](#)

### **PZN (Apotheken-Bestellnummer)**

Zur Bestellung in Ihrer Apotheke notieren Sie sich bitte folgende Apotheken-Bestellnummer:

**Für Deutschland: PZN(2037800)**

**Für Österreich: PZN(3377544)**

**Zur Reinigung empfehlen wir Ihnen unseren**

**Schnarchschiene-Reiniger**

\*Somnolis® **gegen Schnarchen** ist die Meistverkaufte Schnarchschiene unter 30 €